

器(02)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン 耳鼻鏡

- ＊ ＊【警告】
- ・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】
  - ・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分及び周辺部が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】
  - ・電球を交換する際は、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換して下さい。
  - ・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照明したりしないで下さい。【眼の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります】
  - ・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、眼を保護して下さい。

- 【禁忌・禁止】
- ・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】
  - ・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】
  - ・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

＊ ＊【形状・構造】

代表例

20000



23820



23920



21700



22821



＊ ＊ 71919

パワーハンドル



【使用目的、効能又は効果】

本品は、一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるハンディ型ライトである。

＊ ＊【品目仕様等】

ハロゲンランプ又はLEDランプ  
3.5V 充電式ハンドルまたは単三乾電池(2本)使用

【操作方法又は使用方法】

- 1) ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認して下さい。
- 2) ヘッドをハンドルの取り付け部に垂直に装着し回転させて固定する。(イルミネーター付タイプのヘッドは、ハンドル接続部とヘッド上部が、ねじ式で分離可能ですので、確実に接続部が取り付けられていることを確認して下さい。)
- 3) ハンドルの点灯スイッチを操作し、照明光を点灯させスイッチの回転により適切な明るさに調節して下さい。
- 4) ヘッド先端に、患者の外耳道/鼻腔径にあったスペキュラを取り付け、患者の外耳道又は鼻腔にスペキュラ先端部を挿入し、ヘッドの開口部より

外耳道、鼓膜又は鼻腔の検査を行う。

- 5) 単三電池内蔵型はハンドルのスイッチを入れ耳鼻鏡を点灯させ使用して下さい。

＊ ＊【使用上の注意】

- ・本品は、使用方法を熟知した医師または、医師の指導・監督の下にある者以外は使用しないこと。
- ・本品に患者の体液・血液などが付着した場合は、速やかに洗浄又は拭き取りの上、感染予防のための処置を行うこと。
- ・ハロゲンランプを使用する場合は、使用中又は使用直後は、光源部周辺が高温になる場合があります。
- ・交換用ランプは、ウェルチ・アレン社の指定ランプのみを使用すること。
- ・ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化する可能性があるため紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないこと。
- ・ディスプレイタイプスペキュラは、一人の患者のみに使用し、他の患者に使用しないこと。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

【貯蔵・保管方法】

清潔な場所に保管して下さい。

＊ ＊【保守・点検に係わる事項】

洗浄・清掃方法

- ・ハンドル及びヘッド本体は、消毒用エタノール又は、希釈した中性洗剤液を含ませた布で拭き、完全に乾燥させる。
- ・ヘッドの光学部は、市販の光学部品用クリーナー等を含ませた柔らかい布などで拭いた後、完全に乾燥させて下さい。清掃の際は、洗剤液などを過度に付けすぎないよう、十分注意して下さい。
- ・リユーザブルスペキュラは、グルタルアルデヒド溶液を用い薬剤メーカー指定時間・温度に従い、また、70%イソプロピルアルコールへの浸漬にて消毒が出来ます。
- ・リユーザブルスペキュラの滅菌方法
  - ・標準サイクルによるオートクレーブ滅菌。但し、138 を超えないこと、また強制脱気は行わないこと。
  - ・10-100%エチレンオキシドガスを用いた滅菌。但し、暴露は4時間、55℃を超えないこと。また、滅菌後49℃で12-16時間のエアレーションを行うこと。
  - ・グルタルアルデヒド溶液を用い、薬剤メーカーの指定時間・温度に従い滅菌が出来ます。

【包装】

本体:1セット又は1組

＊ ＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社  
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル  
電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ アレン、インク (アメリカ合衆国) Welch Allyn Inc.